


# Elektrisk sug

## SAM 18 ventrikelsug

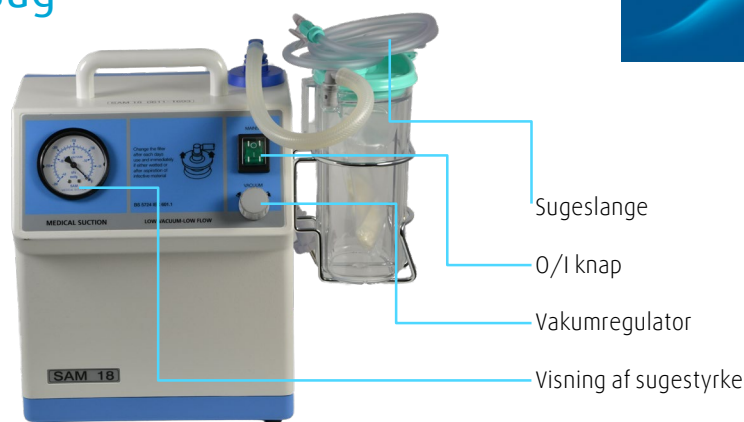

### Vejledning

- Suget tilsluttes en stikkontakt og tændes ved at vippe 0/I knappen.
- Luk fingerdip'en med proppen og studs en til sugekateter med en tommelfinger.
- Indstil den ønskede sugestyrke på vakumregulatoren mellem 0 og 0,2 bar.
- Påsæt udvalgte sugekateter på studs hertil og suget er nu klar til brug.

### Udsugning afsluttes

- Før suget slukkes skal sugeslangen gennemskylles med lidt vand (sug lidt vand fra et glas gennem slangen).
- Suget slukkes derefter ved at trykke på 0/I knappen.

### Rengøring af suget

For at undgå at suget forurenes med luftvejssekreter, er det nødvendigt at holde det rent. Det genanvendelige sugelas og den kraftige slange, der er monteret mellem sug og sugelas rengøres, når de er synligt forurenet. Engangssugepose kasseres når den er  $\frac{3}{4}$  fuld – eller hver 4. dag. Sugelangen udskiftes efter behov. Sugapparatet aftørres med en opvredet klud.

### Klargøring af sugepose

- Den kraftige vakumslange fra suget monteres på studs på glasset
- Sugeposen monteres i glasset – vær opmærksom på at posen sidder på hele vejen rundt. Glasset må ikke være vådt, da det kan resultere i utæthed og reduceres sugsevne.
- Sugelangen skubbes på studs ovenpå låget. Det elektriske sug er nu klar til brug.

---

Linde: Living healthcare