

Brugervejledning.

Letvægtsflaske

THE LINDE GROUP

AGA

Montering af flowvælger

1. Flowvælgeren **trykkes** på flasken ved at isætte hanstikket (2) på flowvælgeren i udløserkappen (1) med slangestudsden (3) pegende ned langs flasken.
Der skal **ikke** bruges mange kræfter på at trykke flowvælgeren på plads.
2. Iltbrille påsættes slangestudsden (3).
3. Åbn for flasken på håndtaget (4). Drej en omgang **mod** uret.
4. Ordineret flow indstilles på flowvælgeren (5).
5. Ved endt brug skal flasken lukkes på håndtaget (4).



Demontering af flowvælger

1. Fjern flowvælgeren fra flasken ved at trykke udløserknappen (1) mod flasken – hiv eventuelt ud i flowvælgeren samtidigt.

Ved flow _____ L/min er der til _____ timer i denne flaske.

Konsulent: _____ kommer i området: _____

Husk at bestille flaske/besøg, senest dagen før konsulent er i området.

Dette gælder også når leveringsdagen er en helligdag.

Al henvendelse bedes rettet til **Linde Healthcare** mandag og fredag kl. 08.00– 15.30, samt tirsdag, onsdag og torsdag kl. 08.00–16.00 på telefon: **70 104 103**

I **akutte** tilfælde kan vi kontaktes døgnet rundt på samme nummer.

Flaskebestilling, spørgsmål til udstyr, ferie etc. foretages indenfor normal åbningstid. Der kan også bestilles ilt eller konsulentbesøg på: www.linde-healthcare.dk eller www.hjemmeilt.dk

Linde: Living healthcare

AGA A/S

Linde Healthcare, Vermlandsgade 55, 2300 København S, Danmark

Tel. +45 70 104 103, www.linde-healthcare.dk

05.01.2016