



AT REJSE MED ILT

Linde Gas Therapeutics

AGA

## Valgmulighed I - OXYTRAVEL®

Oxytravel® er et samarbejde mellem Linde Gas Therapeutics og SOS International om at levere ilt på rejsemålet. Dette er den sikreste måde at rejse på, da SOS International overtager ansvaret, og træder til hvis det udleverede udstyr skulle gå i stykker.

Ring til Oxytravel® (se vedlagte brochure). Taler engelsk og fransk. Telefon åben hele døgnet.

Rejsedetaljer, kreditkortoplysninger og ordination skal faxes eller e-mailes til Oxytravel® (se vedlagte formular: General patient details). Derefter vil du modtage et tilbud med en pris for iltleverance på rejsemålet.

Oxytravel® skal have kreditkortoplysninger og trækker betalingen direkte fra din konto efter at have modtaget skriftlig bekræftelse på iltleverancen på rejsemålet

Oxytravel® tilsender dig kvittering på beløbet og du skal selv sørge for evt. refundering fra dit sygehus

## Valgmulighed II

Skal du på ferie i et EU/EØS land (Tyskland, Frankrig, Holland, Belgien, Luxemborg, Italien, Irland, Storbritanien, Spanien, Portugal, Grækenland, Østrig, Finland, Sverige, Norge, Island, Liechtenstein, Estland, Letland, Litauen, Malta, Polen, Schweiz, Slovakiet, Slovenien, Tjekkiet, Ungarn) har du ret til iltbehandling på samme betingelser, som indbyggerne i det pågældende land. Dette kan betyde en vis egenbetaling.

Den læge/afdeling, der har ordineret din ilt i hjemmet, skal i god tid aftale behandlingen på dit rejsemål, ved at kontakte det pågældende sygehus. (se bilag fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet). Kontakt os i god tid inden rejsen, så vil vi tilsende dig folder fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet gældende for det land du skal rejse til

Få en skriftlig bekræftelse på aftalen.

## Valgmulighed III – Rejsekoncentrator eller Kuffert koncentrator

I det omfang udstyret er ledigt, er det muligt at låne enten rejsekoncentrator eller kuffert- koncentrator efter godkendelse fra ordinerende sygehus. Jo længere tid før rejsen vi kontaktes, jo større er chancen for at udstyret er ledigt.

1. Rejsekoncentratoren(Freestyle<sup>®</sup>) er ved hjælp af batteri, mulig at anvende under flyvning.  
Dette skal dog godkendes af det pågældende flyselskab.  
(se Brugervejledning Freestyle<sup>®</sup>)
2. Kuffert koncentratoren skal medbringes i kabinen, da den ellers risikerer at blive ødelagt. Den kan ikke bruges under flyvningen, men der kan gives letvægtsflasker og iltsparer/flowvælger med, hvis flyselskabet tillader dette. Hvis ikke, må ilt under flyvningen købes af flyselskabet. (se Brugervejledning for iltkoncentrator til rejsebrug)


Betingelser er:

- I tilfælde af udstyrssvigt, er det os ikke muligt at reparere eller erstatte det udlånte udstyr på rejsemålet
- Begge typer fungerer ved en såkaldt iltsparer, der kun giver ilt hvis man aktiverer udstyret ved at ånde gennem næsen. Dette kan være et problem for nogle især under søvn.
- Udstyret kan maksimalt udlånes for en periode på 2 uger
- Ved overskridelse af datoen for tilbagelevering af udstyret forbeholder vi os ret til at rejseudstyr ikke længere kan lånes ved fremtidige rejser
- Hvis udstyret ved returnering ikke indeholder alle dele, skal låntager erstatte de manglende dele
- Hvis udstyret beskadiges under rejsen, skal låntageren erstatte dette. Hvis forsikring ikke allerede haves anbefales det at tegne dette, da udstyret har en værdi på kr 25.-30.000.
- Der må under ingen omstændigheder rygges i nærheden af udstyret, da det ikke kan renses for røglugt.

# CHECKLISTE:

- Du må ikke have haft opblussen i sygdommen 3 mdr. før afrejse, hvis du skal forsikres
- Du skal kontakte flyselskab mht. ilt ombord
- Alle kroniske patienter skal have blått sygesikringskort inden afrejse (EU)
- Medicinpas/kort fra egen læge eller lungelæge
- Evt. aftal med læge, at få en Prednisolon og antibiotikakur med som sikkerhed

Linde Gas Therapeutics  
AGA A/S  
Vermlandsgade 55, 2300 Kbh.S.  
Tlf. 70 104 103  
Fax 70 104 102  
E-mail [Healthcare@dk.aga.com](mailto:Healthcare@dk.aga.com)  
www [www.linde-gastherapeutics.dk](http://www.linde-gastherapeutics.dk)

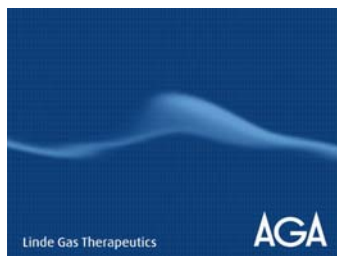

powered by

